

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Слуховой аппарат EM G-25



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Использование аппарата.....	3
3. Правильная зарядка слухового аппарата	4
4. Технические характеристики	5
5. Важно помнить	5

1. Описание устройства

Благодарим вас за покупку нашего слухового аппарата.

Если вам трудно хорошо слышать окружающих, слуховой аппарат поможет вам восстановить слух, чтобы вы могли жить привычной жизнью.

Ношение слухового аппарата поможет Вам заново открыть для себя удовольствие от общения с друзьями и семьей, чувствовать себя более уверенно на работе и наслаждаться фильмами, музыкой и ТВ-шоу.



Громкость регулируется от 0 до 4

Тумблер Вкл/Выкл: O -аппарат выключен, N – аппарат включен

2. Использование аппарата

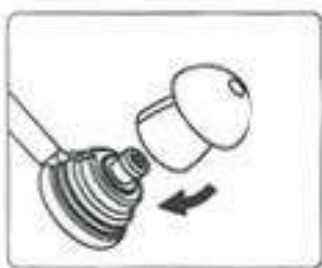


Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

- 1) Наденьте вкладыш на наушник (Рисунок 1).
- 2) Тумблер Вкл/Выкл установите в положение Выкл [O], в противном случае резкий громкий звук может доставить вам дискомфорт.
- 3) Наденьте слуховой аппарат за ухо, плотно вставьте вкладыш в ухо (Рисунок 2)
2) Вкладыш подбирайте чуть большего размера, чем ваше ухо. Он должен плотно прилегать к уху. Это поможет избежать появления шумов в нём.

4) Переключите тумблер Вкл/Выкл в положение Вкл [N] и постепенно настройте громкость, чтобы ясно слышать окружающие звуки.

5) В шумном месте вы можете нажать кнопку режима [M], чтобы изменить программу прослушивания. Слуховой аппарат будет издавать звуковой сигнал при каждом нажатии кнопки режима [M] (Рисунок 3).

Нормальный режим	1 гудок
Режим шумоподавления 1	2 гудка
Режим шумоподавления 2	3 гудка
Режим шумоподавления 3	4 гудка

3. Правильная зарядка слухового аппарата

Если звук в слуховом аппарате очень слабый или слуховой аппарат не работает, возможно, в слуховом аппарате низкий заряд батареи. Когда батарея в слуховом аппарате почти разряжена, он начинает издавать звуковой сигнал. Пожалуйста своевременно заряжайте его.

1) Выключите аппарат на время зарядки (переключите тумблер на [O]), подключите к нему зарядное устройство (5 В, 50 мА- 1 А).

2) Подключите зарядное к сети.

3) Новый слуховой аппарат следует заряжать 6 часов. Желательно ставить на зарядку после того, как аккумулятор полностью разрядился. Светодиод на устройстве загорится зелёным во время зарядки. Когда аппарат полностью заряжен, светодиод выключается.

4) Встроенная литиевая батарея ёмкостью 60 мАч обеспечивает работу устройства до 100 часов после полной зарядки.

Внимание

Не разбирайте самостоятельно слуховой аппарат. В случае возникновения неполадок, обратитесь в сервисный центр. Не утилизируйте батарею слухового аппарата с бытовыми отходами.

4. Технические характеристики

Зарядное устройство	5 В, 50 мА – 1 А
Батарея	60 мАч
Размеры	45x40x10 мм
Вес	6,5 г
Вывод звука	129±4 дБ
Усиление звука	38±5 дБ
Искажение звуковой волны	≤5%
Диапазон частот	400 Гц – 3800 Гц
Входящий шум	≤ 28 дБ
Напряжение	3.7 В
Сила тока	≤2 мА

5. Важно помнить

- 1) Если вы слышите свист во время использования слухового аппарата, убедитесь, что вкладыш плотно зафиксирован в ухе или подберите подходящий по размеру вкладыш из комплектации.
- 2) Пожалуйста, не используйте слуховой аппарат на большой громкости в течение длительного времени, это может повредить ваш слух.
- 3) Следите за состоянием изделия постоянно, чтобы избежать блокировки наушника или микрофона посторонними предметами. Поддерживайте вкладыш в ухо в чистоте.
- 4) Не подвергайте слуховой аппарат и его батарею воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры и воды. Не используйте в душе, под дождём, во время купания.
- 5) Не роняйте аппарат на пол.
- 6) Держите вдали от детей.
- 7) Если в течение долгого времени не планируете пользоваться слуховым аппаратом, вытащите батарею из устройства.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**