



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Слуховой аппарат Ахон V-168**



**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Технические характеристики .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Внешний вид устройства .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Использование.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Уход и обслуживание .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Примечание .....</b>	<b>5</b>

## 1. Введение

Благодарим вас за покупку нашего слухового аппарата.

Если вам трудно хорошо слышать окружающих, слуховой аппарат поможет вам восстановить слух, чтобы вы могли жить привычной жизнью.

Ношение слухового аппарата поможет Вам заново открыть для себя удовольствие от общения с друзьями и семьей, чувствовать себя более уверенно на работе и наслаждаться фильмами, музыкой и ТВ-шоу.


## 2. Технические характеристики

Вывод звука	130±5 дБ
Усиление звука	> 50 дБ
Искажение звуковой волны	< 5%
Диапазон частот	300 Гц - 4000 Гц
Входящий шум	<30 дБ
Напряжение	1,5 В
Сила тока	<4 мА


## 3. Внешний вид устройства




## 4. Использование

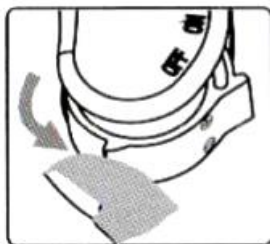

1. Откройте батарейный отсек.

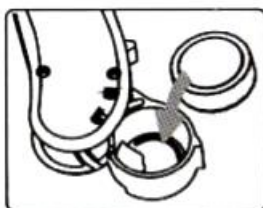

2. Вставьте цинково-воздушную батарею, соблюдая полярность.
3. Перед использованием убедитесь, что слуховой аппарат выключен или поставьте громкость на единицу. В противном случае резкий звук может вызвать неприятные ощущения.

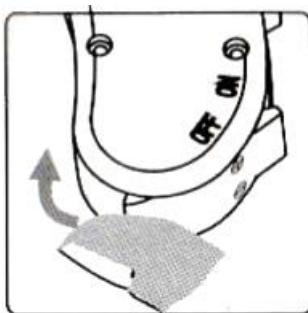

4. Наденьте слуховой аппарат за ухо. Вложите вкладыш в ухо. Он должен плотно прилегать. Подберите размер вкладыша так, чтобы не было никакого зазора между вкладышем и ухом.
5. Включите прибор и отрегулируйте громкость так, чтобы четко слышать окружающие вас звуки.



6. Если вы слышите свист, проверьте плотно ли прилегает вкладыш. Если плотного прилегания не удастся добиться, измените размер силиконового вкладыша.

## **5. Уход и обслуживание**

Отсутствие звука из слухового аппарата может быть вызвано следующими причинами:

1. Аппарат выключен;
2. Батарея вставлена неправильно;
3. Батарея села;
4. Наушник повреждён;
5. Повреждён провод

Если звук стал очень слабым или нечётким, возможно, это вызвано двумя причинами:

1. Батарея почти села;
2. Наушник неисправен.

Используйте чистую сухую ткань и специальное моющее средство для чистки аппарата.

## **6. Примечание**

1. Запрещено использования слухового аппарата людям с тимпанитом или гнойным воспалением уха.
2. Пожалуйста, не используйте слуховой аппарат на большой громкости в течение длительного времени, это может повредить ваш слух.
3. Следите за состоянием изделия постоянно, чтобы избежать блокировки наушника или микрофона посторонними предметами.
4. Поддерживайте вкладыш в ухо в чистоте.
5. Не подвергайте слуховой аппарат и его батарею воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры и воды. Не используйте в душе, под дождём, во время купания.
6. Не роняйте аппарат на пол.
7. Если в течение долгого времени не планируете пользоваться слуховым аппаратом, вытащите батарею из устройства.
8. Не разбирайте самостоятельно слуховой аппарат. В случае возникновения неполадок, обратитесь в сервисный центр.
9. Не утилизируйте батарею слухового аппарата с бытовыми отходами.

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**